



SUNDHEDSTVÆLSELSEN



BRUGSANVISNING:

1. Åbn folien forsigtigt og undgå at kondomet beskadiges af negle eller lignende.
2. Tages på når penis er helt erigeret og før intin kontakt. Placer kondomet på hovedet af penis og rul eller træk det hele vejen til roden.
3. Efterlad et tomrum for enden af kondomet. Fjern overskydende luft i toppen ved at presse luften ud til åbningen.
4. Hvis det føles som om kondomet ikke sidder ordentligt, så stop op og tjek. Ved tvivl om korrekt brug søges lægehjælp hurtigst muligt, senest 72 timer efter samlejet. Kontakt læge eller apotek ved brug af anden medicin, som kommer i kontakt med kondomet.
5. Efter udløsning og mens penis stadig er erigeret, holdes fast for enden af kondomet således at kondomet ikke slipper af, mens penis trækkes tilbage.

VIRKNING: Hvis de anvendes korrekt vil Colour-way kondomer være medvirkende til at reducere risiko for overførsel af seksuelt overførbare sygdomme samt reducere risiko for graviditet. Ingen prævention garanterer 100% virkning.

ADVARSEL:

Dette produkt indeholder naturlig gummilatex, som KAN MEDFØRE ALLERGISKE REAKTIONER

DESIGN:

Mikkel Bock
Kadaver.dk

CE 0123

LOT 7321

EXPIRY DATE:
2022/05

MFG BY:

Suzhou Colour-way
Enterprise Development
Co., Ltd.
83 Changping Road,
Dongqiao, Jiangsu
215152, China

EU REPRESENTATIVE:

Shanghai International
Holding Corp.
Eiffestrasse 80
20537 Hamburg,
Germany

IMPORTØR:

Everbest Trading
Slagtehusgade 20
1715 København V



SUNDHEDSSTYRELSEN

SIKKERHED: Brug et nyt kondom hver gang. Kondomer må ikke genbruges. Opbevares tørt og køligt. Brug ikke kondomet hvis gummimaterialet er klæbrigt, sprødt eller tydeligvis ødelagt. Hvis smøremiddel ønskes, brug da vandbaseret smøremiddel.

BRUG IKKE OLIEBASERET SMØREMIDDEL

da disse kan forårsage ødelæggelse af kondomet.